

ジェヌエアチェックシート

確認日 年 月 日

エクリラ



- 1 カウンターの表示を確認します。
信号の色を確認します。
キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します。



- 2 吸入器を水平に持ちます。
ボタンを下までしっかりと押して離します。
ボタンを押すと信号が赤色から緑色に変わります。



- 3 しっかり息を吐きます。
吸入口を軽くかんで唇で包むように深くくわえます。
強く深く吸い込みます。
カチッと音がして、信号が緑色から赤色へ戻ります。
ボタンを押したまま吸入しないように注意して下さい。



- 4 吸入口から口を離し、5~10秒程度息を止めます。

- 5 ゆっくりと静かに息をはき、
元の呼吸に戻してください。

- 6 キャップをします。

- 7 吸入後、のどや口の中に残った薬剤が気になる方は
うがいをしてください。



↑ 実践できている項目にチェックをしてください。

副作用発現状況

なし・嘔声・動悸・振戦・口内痛・その他()

担当薬剤師意見欄

薬局 薬剤師氏名 _____